




PASTILLAS SECANTES para audífonos

CAPSULE DISIDRATANTI per apparecchio acustico

DROOGTABLETTEN Voor gehoorsysteem

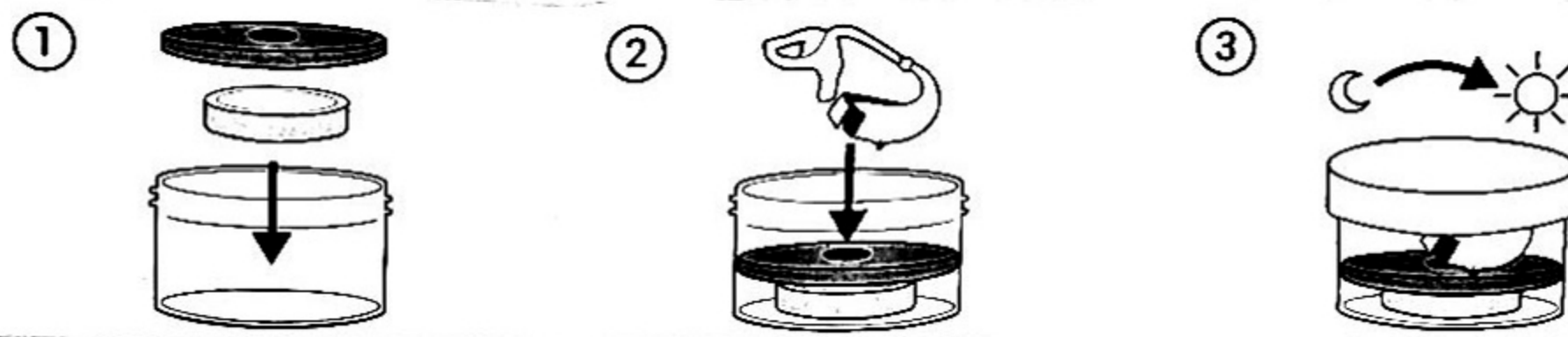

- ES** 1 - Coloque la pastilla en el vaso, lado de cartón hacia arriba.
2 - Desconecte sus audífonos abriendo el compartimento de la pila, colóquelos en el recipiente e ciérrelo.
3 - Déjelos en el recipiente durante toda la noche.

Precauciones de uso: Uso externo. Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. No abra ni rompa la cápsula.

- IT** 1 - Porre la capsula nel contenitore con la parte in carta verso l'alto.
2 - Spegner l'apparecchio o aprire lo sportellino della pila e metterlo nel contenitore chiudendo quest'ultimo con l'apposito tappo.
3 - Lasciare agire tutta la notte.

Precauzioni d'uso: Uso esterno. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non ingerire. Non forare o aprire la capsula.

- NL** 1 - Plaats de tablet in het doosje, de kant in karton naar boven gericht.
2 - Zet het hoortoestel uit en open de batterijlade, plaats het in het doosje en sluit het doosje.
3 - Laat het toestel in het doosje liggen wanneer het niet gebruikt wordt.

Voorzorgsmaatregelen: Enkel voor uitwendig gebruik. Houd buiten het bereik van kinderen. Niet inslikken. Maak de tabletten niet open of stuk.



ad MG Développement - ZA aéroport de Montpellier - 34470 Pérols - FRANCE



Una gama completa
de productos para cuidar
los aparatos auditivos

Una gamma completa
di prodotti per la cura
degli apparecchi acustici

Een uitgebreid gamma
van verzorgingsproducten
voor hoorapparaten

